

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Descrição: Equipo de Infusão Gravitacional (Macrogotas/Microgotas)

Fabricante: ANHUI TIANKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Importador e Detentor da Notificação: Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda.

EAN: 7908942000153 (microgotas) e 7908942000146 (macrogotas)

NCM: 90189010

Notificação Anvisa: 80239540003

Responsável Técnica: Mauren Franzen de Azevedo CRF/RS 16255

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagem principal: Blister contendo 1 unidade

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo



DADOS TÉCNICOS

Equipo gravitacional de uso único, com câmara flexível podendo ser macrogotas ou microgotas.

MODELOS CADASTRADOS

PMC-MAC - Equipo Gravitacional Macrogotas

PMC-MIC - Equipo Gravitacional Microgotas

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Abra a embalagem de forma asséptica e retire o dispositivo do invólucro protetor;
- 2- Feche o regulador de fluxo totalmente, retire o protetor do penetrador e conecte no frasco/ampola da solução;
- 3- Preencha a câmara de gotejamento com a solução até um terço ou metade da sua altura, quando presente abrir o respiro de ar após o preenchimento da câmara de gotejamento;
- 4- Retire a tampa do conector;
- 5- Abra o regulador de fluxo sutilmente até que o líquido preencha totalmente o tubo flexível, para evitar bolhas de ar;
- 6- Após o preenchimento de todo o tubo flexível feche novamente o regulador de fluxo;
- 7- Encaixe o conector no dispositivo de infusão (escalpe, agulha, cateter etc.) de acordo com as normas técnicas assépticas;
- 8- Abra o regulador de fluxo e ajuste a velocidade do gotejamento de acordo com a prescrição médica;
- 9- Use o injetor lateral, quando presente, para a medicação complementar;
- 10- Use a pinça clamp, quando presente para interromper o fluxo, quando presente;
- 11- Após o uso, desconecte o acesso do paciente e descarte o produto conforme normas de biossegurança da instituição.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Uso único;
- PROIBIDO REPROCESSAR, destruir após o uso;
- Após o uso descartar em local apropriado;
- Não utilizar se a embalagem estiver violada;
- Não utilizar se observar algum corpo estranho no produto.

CONTRAINDICAÇÕES

Sem contraindicações.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Deve ser armazenado com umidade abaixo de 80%, livre de gás corrosivo, temperatura ambiente, local seco, boa ventilação e limpo.

CONDIÇÕES DE VALIDADE

Embalagem fechada: 5 anos a partir da data de fabricação.

CANAIS DE ATENDIMENTO

SAC: 0800-346-2020

sac.distribuidora@centralrs.unimed.com.br