

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Descrição: Equipos de Transfusão de Sangue

Fabricante: ANHUI TIANKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Importador e Detentor da Notificação: Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda.

EAN: 7908942000160

NCM: 90189010

Notificação Anvisa: 80239540004

Responsável Técnica: Mauren Franzen de Azevedo CRF/RS 16255

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagem principal: Blister contendo 1 unidade

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo

POLiMAX
Medical Care

Equipo de Transfusão de Sangue

Advertências e Precauções

- Equipos de infusão gravitacional assépticos e de uso único.
- Somente para infusão por gravidade.
- Armazenar em local seco e fresco.
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Esterilizada por Óxido de Etileno.
- Atóxico e apirrogênico.
- Destruir após o uso.
- Proibido reprocessar.

Especificações Técnicas

- Ponta perfurante com entrada de ar e filtro hidrofóbico.
- Dispositivo para entrada de ar ABNT NBR ISO 8536-4 IS-AD.
- Câmara gotejadora flexível.
- Transfusão de sangue.
- Filtro de partículas de 15µ.
- Tubo flexível de 1,50 cm.
- Injetor lateral - Y auto-cicatrizante.
- Regulador de fluxo.
- Conector luer slip.

Instruções de uso:

1. Verificar o tipo adequado, conforme indicação na embalagem.
2. Verificar a integridade da embalagem e retirar o equipo da embalagem o mais próximo possível do momento de seu uso.
3. Não utilizar caso os protetores da ponta perfurante estejam desconectados.
4. Abrir a embalagem conforme técnica asséptica.
5. Executar o procedimento escolhido.
6. Após o uso, descartar o equipo imediatamente em local para materiais consumidos.
7. Não reutilizar ou esterilizar o equipo após o seu uso.

Fabricado por:
Anhui Tiangkang Medical Technology Co., Ltd.
Manufacturer Address: No. 228 Wuyi Road, Economic
Development Zone, Tianchang city, 238800 Anhui, P.R.
China.

Detentor da Notificação:
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed
do Rio Grande do Sul Ltda.
Rua Bagé, 300 - Niterói - Canoas - RS - CEP 92120-190
CNPJ 02.404.715/0001-73 - IE 024/0350087

Responsável Técnica:
Notificação Anvisa:

Saúde
Compartilhando a Saúde

SAC: 0800 346 2020
sac.distribuidora@centralunimed.com.br
Central de Vendas: F: (51) 3462-6415 | E: (51) 3462-6415
unimed.corp.br/rio-grande-sul/central/centralunimed

Lote - Data de fabricação

POLiMAX
Medical Care

DADOS TÉCNICOS

Equipo de transfusão de sangue de uso único, com câmara flexível e filtro.

MODELOS CADASTRADOS

PMC-TFS - Equipo de Transfusão de Sangue

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abrir a embalagem de forma asséptica.
2. Realizar assepsia no local de inserção do equipo na bolsa.
3. Fechar a pinça rolete.
4. Introduzir a ponta perfurante na saída apropriada da bolsa de sangue
5. Colocar a bolsa de sangue em posição vertical, para transfusão;
6. Encher a câmara superior do equipo e sob pressão / descompressão digital passar sangue para a câmara inferior, até altura de 1/3
7. Abrir a pinça rolete e retirar o ar de toda a extensão.
8. Conectar a ponta Luer escolhida no dispositivo de acesso venoso.
9. Controlar o fluxo de gotejamento de acordo com a prescrição médica.
10. Caso necessário abrir a entrada de ar.
11. Após a utilização descartar em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Uso único;
- PROIBIDO REPROCESSAR, destruir após o uso;
- Após o uso descartar em local apropriado;
- Não utilizar se a embalagem estiver violada;
- Não utilizar se observar algum corpo estranho no produto.

CONTRAINDICAÇÕES

Sem contraindicações.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Deve ser armazenado com umidade abaixo de 80%, livre de gás corrosivo, temperatura ambiente, local seco, boa ventilação e limpo.

CONDIÇÕES DE VALIDADE

Embalagem fechada: 5 anos a partir da data de fabricação.

CANAIS DE ATENDIMENTO

SAC: 0800-346-2020

sac.distribuidora@centralrs.unimed.com.br