

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Descrição: Luvas de Procedimento Não Cirúrgico, de borracha nitrílica, sem Pó

Fabricante: KL-KEPONG RUBBER PRODUCTS SDN. BHD (Malásia)

Importador e Detentor da Notificação: Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda.

EAN: 790894200

NCM: 40151200

Notificação Anvisa: 80239540002

CA: 52.202

Responsável Técnica: Mauren Franzen de Azevedo CRF/RS 16255

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 100 unidades

Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 10 cartuchos



DADOS TÉCNICOS

Luva de procedimento produzida com borracha nitrílica, sem pó, cor azul, estéril, texturizada, ambidestra e descartável. Indicada para proteção individual em procedimentos não invasivos e não estéreis, evitando contaminações.

MODELOS CADASTRADOS

Luvas de procedimento não cirúrgico nitrílica P, M, G

INSTRUÇÕES DE USO

1. Retirar todos os objetos das mãos e punhos, incluindo anéis, pulseiras e relógios;
2. Higienizar as mãos;
3. Inspecionar as luvas quanto a defeitos, imperfeições e tamanho adequado;
4. Calce as luvas;
5. A cada 60 minutos troque as luvas para evitar falhas na proteção;
6. Retire as luvas puxando pelo punho em direção aos dedos, virando-as do avesso;
7. Descartar em recipiente adequado (resíduo infectante, grupo A1);
8. Higienizar novamente as mãos.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Não utilizar o produto caso este esteja fora da data de validade;
- Produto não estéril;
- Caso as luvas rasguem durante o procedimento devem ser removidas e descartadas;
- Ao retirar as luvas evite tocar a parte contaminada;
- Estas luvas não devem ser utilizadas na manipulação de produtos químicos, ácidos, líquidos quentes nem na presença de fogo;
- Fabricante recomenda uso único;
- PROIBIDO REPROCESSAR, destruir após o uso;
- Após o uso descartar em local apropriado.

CONTRAINDICAÇÕES

Não há

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Não são informados métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de recomendação de uso único. O descarte deste produto deve ser feito imediatamente após a utilização. Sugere-se o descarte do produto em recipiente identificado como resíduo infectante (grupo A1 de acordo com a RDC 222/2018) na cor branca e devidamente identificado.

CONDIÇÕES DE VALIDADE

Embalagem fechada: 3 anos a partir da data de fabricação.

Embalagem aberta: As luvas devem ficar acondicionadas em sua embalagem original até o momento de sua utilização.

CANAIS DE ATENDIMENTO

SAC: 0800-346-2020

sac.distribuidora@centralrs.unimed.com.br